



Система непрерывного мониторинга глюкозы СТ14


НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Регистрация изменений концентрации глюкозы у людей, страдающих сахарным диабетом

ОТ
4 ЛЕТ

ГДЕ НОСИТЬ


Плечо или средняя часть живота

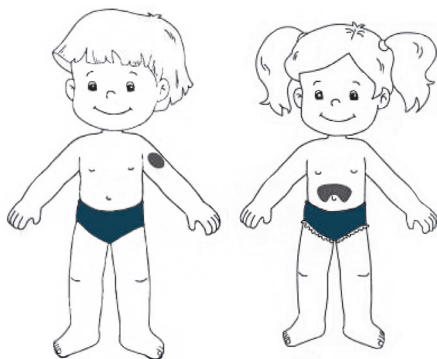


14
ДНЕЙ

ЗАМЕНА
ДАТЧИКА


Передатчик*

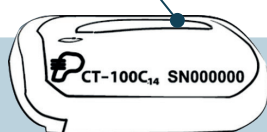

Смартфон пациента

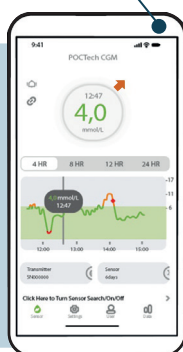

Приемник

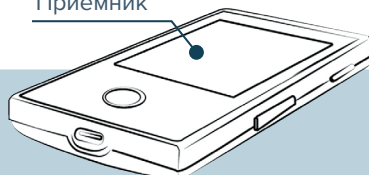

Передача данных


Беспроводная непрерывная передача показаний глюкозы

*срок службы 2 года


Контроль 24/7

Просмотр на приемнике или смартфоне с установленным приложением POCTech CGM


РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

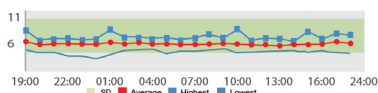

Почасовая динамика за 24 часа

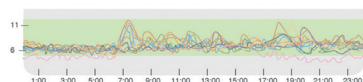

Общий график

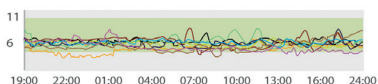

Данные за 24 часа

ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ




Вибро или звуковой сигнал при гипо/гипергликемии



Система непрерывного мониторинга глюкозы СТ14

Диабет под контролем!

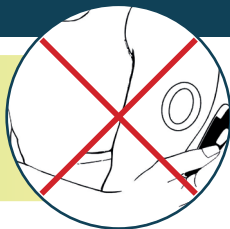

БОЛЬШЕ НИКАКОГО FLASH-МОНИТОРИНГА

Данные автоматически передаются на смартфон или приемник

ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Степень защиты IP27 позволяет принимать душ и плавать в бассейне до 30 минут



УВЕРЕННОСТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ

С системой СТ14 можно не беспокоиться пропустить гипо/гипергликемию во время сна




КАЛИБРОВКА



Продолжайте измерение уровня глюкозы для калибровки и подтверждения данных

ДЕЛИТЕСЬ ДАННЫМИ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ИЛИ БЛИЗКИМИ

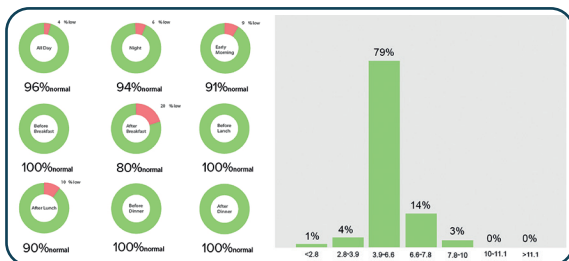

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Не сдавайте систему в багаж, возьмите ее на борт самолета



Предупредите сотрудника аэропорта об установленном датчике



Снимите датчик перед КТ, МРТ или рентген исследованием



В случае аллергических реакций немедленно удалите датчик и обратитесь к врачу

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Деловой центр РСС»
Горячая линия: 8 804 700 53 73 (звонок бесплатный)

Производитель:
«Чжэцзян ПОКТех Ко., Лтд.»
(Zhejiang POCTech Co., Ltd.)

